

1. IDENTIFIKACE VÝROBKU

CliniX 1.8x450	REF: CPHF4008-450
CliniX 1.8x1800	REF: CPHF4008-1800
Heidelberger 75	REF: CPHF51070
Heidelberger 140	REF: CPHF51150
Perfusion line 150	REF: CPHF50150
Perfusion line 200	REF: CPHF50200

2. NÁVOD K POUŽITÍ

Společnost ProActive S.r.l. a její distributor Clinipharma s.r.o používá návod k použití formou jednoznačných a srozumitelných textů:

- 1) Odstraňte ochranné kryty;
- 2) Připojte prodlužovací hadičku k infuznímu setu přes konektor a když je tam kohout, otevřete ho pro zabezpečení průtoku;
- 3) Nechte roztok téct a odstraňte případné vzduchové bubliny.

Upozornění: Neskladujte ve vysoké vlhkosti, na přímém slunci ani při extrémních teplotách. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Pro použití pouze vyškoleným personálem. Používejte soupravu ihned po otevření a vyjmutí z obalu. Nepoužívejte znovu. Při opakovaném použití může být pacient vystaven riziku křížové infekce.

Testováno na přítomnost pyrogenů.

Pozn: Texty jsou zobrazeny přímo na jednotkovém obalu produktu (balení pro 1 kus)

3. SYMBOLY NA OBALE

Na obale jsou uvedeny následující důležité informace a symboly:

	Název a adresa výrobce		Značka shody dle směrnice EU
	Expirace/použit do data		Nepoužívat opětovně. Na jedno použití
	Šarže/výrobní dávka		Chránit před vlhkem
	Katalógové číslo		Chránit před slunečním zářením



Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno



Výrobek je apyrogenní



Datum výroby



Obsah nebo přítomnost ftalátů



Sterilizováno ethylen-oxidem



Výrobek neobsahuje latex



Neprovádět opětovnou sterilizaci

Revize: 01/01.08.2021

Distributor:Clinipharma s.r.o., Viklefova 1795/10,
13000 Praha, Česká republika**Výrobce:**

CE 0425