

1. IDENTIFIKACE VÝROBKU

SOLUCARE

REF: CPH40010-180DF

- DEHP FREE, 1800mm délka hadičky


SOLUCARE RV

REF: CPH40010CHV-180DF)

- DEHP FREE, 1500mm délka hadičky
- se zpětným ventilem

2. NÁVOD K POUŽITÍ

Společnost ProActive S.r.l. a její distributor Clinipharma s.r.o používá návod k použití formou jednoznačných a srozumitelných obrázků textů:

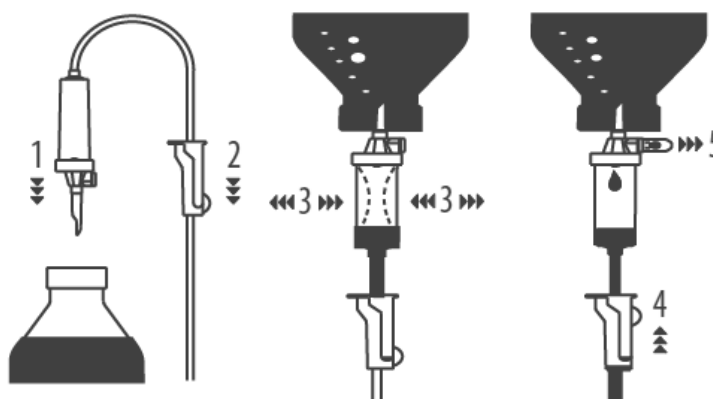

- 1) vložte trn do nádoby na roztok (sáček nebo láhev);
- 2) uzavřete regulátor průtoku;
- 3) stiskněte komoru tak, aby byla do poloviny plná.
- 4) poté otevřete regulátor průtoku;
- 5) Otevřete odvzdušňovací ventil (pokud je v lahvi roztok), aby tekutina mohla vytéct a odstranit veškeré vzduchové bubliny.

Upozornění: Neskladujte ve vysoké vlhkosti, na přímém slunci ani při extrémních teplotách. Nepoužívat s krví, buněčnými složkami a roztoky s vysokou viskozitou. Nepoužívejte, pokud je obal poškozen. Pro použití pouze vyškoleným personálem. Používejte soupravu ihned po otevření a vyjmutí z obalu. Nepoužívejte znovu. Při opakovaném použití může být pacient vystaven riziku křížové infekce. Testováno na přítomnost pyrogenů.

Pozn: Obrázky a texty jsou zobrazeny přímo na jednotkovém obalu produktu (balení pro 1 kus)

3. SYMBOLY NA OBALE

Na obale jsou uvedeny následující důležité informace a symboly:



Název a adresa výrobce



Značka shody dle směrnice EU



Expirace/použít do data



Nepoužívat opětovně. Na jedno použití



Šarže/výrobní dávka



Chránit před vlhkem



Katalógové číslo



Chránit před slunečním zářením



Nepoužívat, jestliže je balení poškozeno



Výrobek je apyrogenní



Filtr kapaliny a velikost pórů



Počet kapek na mililitr

15 µm filter

20 $\pm$ 1g $\pm$ 0,1g



Datum výroby



Neobsahuje ftaláty

STERILE EO Sterilizováno ethylen-oxidem

Revize: 00/01.08.2021

Distributor:

Clinipharma s.r.o., Viklefova 1795/10,
13000 Praha, Česká republika

Výrobce:

PRO-ACTIVE S.r.l. Viale del Commercio 12,
Rovigo 45100, Italy

CE 0425